

alfalex®

- k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním
- pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin
- díky složení je jeho účinek komplexní

Alfalex čípky

10 rektálních čípků
Doporučené použití
1–2x denně.
Před použitím si přečtěte návod
k použití.



Zdravotnický prostředek

Alfalex mast s aplikátorem

25 g rektální masti
Doporučené použití
1–2x denně.
Před použitím si přečtěte
návod k použití.



Zdravotnický prostředek




www.alfalex.cz

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud se příznaky nezlepší do 1-2 týdnů, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin nebo jinou obsaženou složku přípravku. Nepoužívejte na krvácející hemoroidy. Zdravotnický prostředek IIa třídy, CE2409. Výrobce Egis Pharmaceuticals PLC.

Aplikace čípků

Ideální je zavádět čípek na noc, abyste mohli zůstat v klidové poloze, nejlépe po koupeli. Umyjte si ruce a začněte s aplikací.

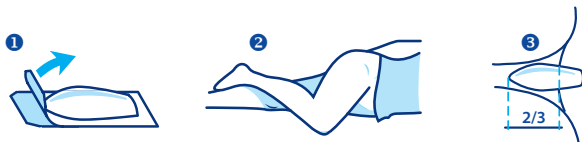

- 1 Ve směru šipky odstraňte z horní části obal a vyjměte čípek.
- 2 Čípek zavádějte v leže na boku, je to nejsnadnější způsob aplikace.
- 3 Zaved'te do konečníku pouze 2/3 čípku a nechte jej lehce rozpustit. Po chvíli zaved'te zbývající část čípku (ne příliš hluboko) a umyjte si ruce. Je vhodné použít slipové vložky.

Aplikace masti

Mast nanášejte ideálně po vyprázdnění, nejlépe po koupeli. Před a po použití si vždy umyjte ruce.



- 1 Nasad'te aplikátor na tubu, zkontrolujte, že je dobře upevněn a sejměte víčko.
- 2 Na aplikátor naneste tenkou vrstvu masti a pak jej zaved'te do konečníku a poté jej současně vytahujte a jemně tlačte na tubu. Pro jednu aplikaci použijte množství velikosti hrášku. Aplikátor po každém použití očistěte teplou vodou a mýdlem a uzavřete víčkem. Aplikátor je určen pro použití pouze 1 osobou.

Pro vnější použití naneste dle potřeby v tenké vrstvě mast v okolí konečníku.

TIP: Vyzkoušejte kombinaci čípku na noc a masti na den.